

OMNIMAT

How to fold the OMNIMAT correctly

OmniMat richtig zusammenfalten

Come piegare correttamente l'OMNIMAT

Comment plier correctement l'OMNIMAT
(matelas corps entier)

The whole body applicator OmiMat has a hard and a soft side.
The OmniMat logos are placed the soft side (image 1).

Der Ganzkörperapplikator OmiMat besitzt eine harte und eine weiche Seite.
Auf der weichen Seite sind die OmniMat Logos angebracht (Bild 1).

L'applicatore per tutto il corpo OmniMat ha un lato rigido e uno morbido.
I loghi OmniMat sono posizionati sul lato morbido (immagine 1).

L'applicateur pour tout le corps OmiMat a un côté dur et un côté souple. Les logos OmniMat sont placés sur le côté souple (image 1).



image 1 / Bild 1 / immagine 1 / image 1

Fold the hard sides against each other lengthways so that the logo is still visible (image 2).

Falten Sie die harten Seiten längs gegeneinander, so dass das Logo weiterhin sichtbar ist (Bild 2).

Piegare i lati rigidi l'uno contro l'altro nel senso della lunghezza in modo che il logo sia ancora visibile (immagine 2).

Pliez les côtés durs l'un contre l'autre dans le sens de la longueur de façon à ce que le logo soit toujours visible (image 2).



image 2 / Bild 2 / immagine 2 / image 2

Then fold the applicator into a "Z" shape (image 3).

Falten Sie den Applikator anschließend in „Z“-Form zusammen (Bild 3).

Quindi piega l'applicatore a forma di „Z“ (immagine 3).

Puis pliez l'applicateur en forme de „Z“ (image 3).

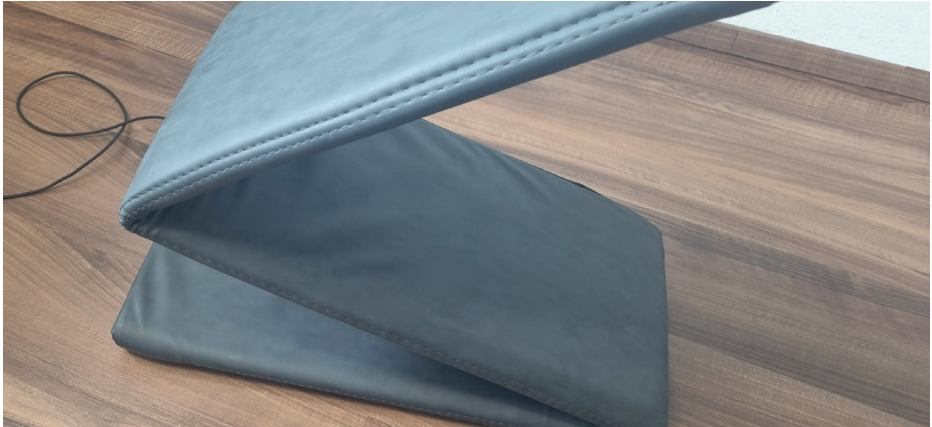


image 3 / Bild 3 / immagine 3 / image 3

Finished folded applicator (image 4).

Fertig gefalteter Applikator (Bild 4).

Applicatore piegato finito (immagine 4).

Applicateur plié (image 4).



image 4 / Bild 4 / immagine 4 / image 4



Swiss Bionic Solutions Schweiz GmbH

Schulhausstrasse 17 | 8834 Schindellegi, Schweiz
Telefon: +41 (62) 295 5951 | Fax: +41 (62) 295 5952
E-Mail: ch@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Deutschland GmbH

Biberacher Str. 87 | 88339 Bad Waldsee, Deutschland
Telefon: +49 (7524) 996 950 | Fax: +49 (7524) 996 9518
E-Mail: de@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions USA Inc.

12330 SW 53rd Street | Suite 703 & 704 | Cooper City | Florida 33330, USA
Telefon: +1 (954) 766 4153 | Fax: +1 (954) 766 4156
E-Mail: us@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Canada Inc.

1195 North Service Rd. West, Unit B8 | Oakville, Ont. L6M 2W2, Kanada
Telefon: +1 (905) 465 0753 | Fax: +1 (1 866) 792 8182
E-Mail: ca@swissbionic.com

Swiss Bionic Solutions Asia Ltd.

Unit B, 7/F. Office Plus @Mongkok, 998 Canton Road, Mongkok, Kowloon,
Hong Kong
Telefon: +852 2337-8774
E-Mail: asia@swissbionic.com

www.swissbionic.com